

NON-STERILE SAFETY-VAC 1000+ PRE-VAC WOUND DRAINAGE BOTTLE 1000ml

Vac 1000 de seguridad no estéril y la botella de drenaje de la herida pre-vac 1000ml


REF : SV1000-NS



This Product is Non-Sterile with a sterile pathway: Do not use if package is opened or damaged.
Re-use of this product will cause the risk of cross infection and unpredictable health threat.
Este producto no es estéril con una vía estéril: no lo use si el paquete está abierto o dañado.
Utilizando este producto otra vez incrementará el riesgo de infección cruzada y es una amenaza de salud impredecible.

Directions for use

1. Open the pouch and remove the Non-Sterile Bottle.
 2. Inspect the vacuum indicator to ensure that it completely compressed. If not, do not use this product.
 3. Choose an appropriate drain-line and connect the bottle to the patient drainage device.
 4. After checking that all connections are secure, open all clamps on the bottle and drain-line to activate the vacuum.
 5. If necessary, you may adjust the flow rate during drainage procedure.
 6. Repeat steps 1 to 5 with a new bottle if further drainage is required.
 7. Discard the bottle as per your local requirements.
-
1. Abre el paquete y quita la botella no estériles.
 2. Mira el indicador vacío para asegurar que es completamente comprimado.
 3. Escoge una línea de drenaje apropiado y conecta la botella al dispositivo drenaje del paciente.
 4. Después de asegurar que todos las conecciones son seguras, abre todas las tapas y la línea de drenaje para activar el vacío.
 5. Si necesita, se puede ajustar el caudal durante el procedimiento de drenaje.
 6. Repite pasos 1-5 con una nueva botella si es necesario de drenejar más.
 7. Deseche la botella según sus requisitos locales.

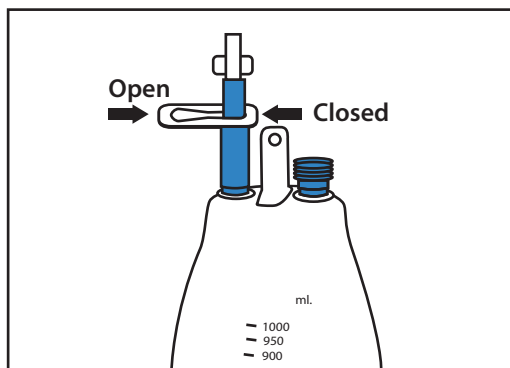

Distributed Exclusively in the United States by:



Jigsaw Medical™

1012 Airpark Dr. Suite 1, Sugar Grove, IL 60554
Tel: 630-587-0019 | Fax: 630-524-9088
Email: Fax@jigsawmed.com
www.jigsawmed.com

Manufactured by:

POLY MEDICURE LIMITED

Plot No. 104-105, HSIDC Industrial Area,
Ballabhgarh-121004, Faridabad, India

Customer Care No. (0129) 4287053

For providing feedback on this product write to customer-care@polymedicure.com